

Provtagningsanvisning Gynekologiskt cellprov Konventionell cytologi - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Gynekologisk cytologi OBS! Kryssa i rutan på remissen om det är en "Kallad Gynekologiskt cellprov" eller "Indicerad vaginalcytologi".
Provtagning	Använd: • Objektglas, superfrost vit. • Spatel. • Cytobrush • Objektglaskassett. • Etanol 95 % Provet tas före eventuell annan undersökning inklusive palpation. Spekulum införs, helst utan glidmedel. Provet tas med speciell gynspatel (Aery-spatel) och cytobrush, se vårdprogram från kvinnokliniker och gynmottagningar i Gävleborgs län. Prov 1 från portio: Tas med den spetsiga delen av spateln från själva portioytan och stryks ut på glasets nedersta del. Prov 2 från endocervix: Tas med cytobrush. Sekretet skall representera celler från transformationszonen. Sekretet stryks ut med en roterande rörelse på objektglasets översta del. Fixering: Omedelbart efter provtagningen placeras objektglaset i en kyvett med Etanol 95 % i minst 15 minuter, varefter objektglaset lufttorkas. Byt Etanol 95 % i kyvetten varje dag.
Förvaring/Transport	Provet skall stå i rumstemperatur. Objektglaset skickas i objektglaskassett. Glas och remisser skall ligga i samma ordning.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt

Provtagningsanvisning

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning Gynekologiskt cellprov Konventionell cytologi - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

2(2)

Dokument ID: 09-76916

Giltigt t.o.m.: 2024-10-31

Revisionsnr: 4

Svarstid	Vanligen inom 20 arbetsdagar (måndag-fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Nej
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja
Kommentarer/Övrig upplysning	
Medicinsk bakgrund/indikation	Prov för den gynekologiska cellprovskontrollen inom det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention. Misstänkt malignitet pga. symptom från livmoder/livmoderhals, exempelvis kontaktblödning/postmenopausal blödning.

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring