

Provtagningsanvisning Clostridioides difficile - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Påvisning av toxigen

Remiss	Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg)
Provtagning	Faecesburk med sked > 2 mL färsk och lös* avföring. Fyll röret till 1/3. Den kliniska relevansen av att analysera faeces i fast form är tveksam. * Provet ska forma sig efter provtagningskärlets väggar. Konsistens Typ 5-7 enligt " Bristol Stool Chart " analyseras.
Förvaring/Transport	Prov bör transporteras och förvaras kylt i 2-8°C och är då hållbart upp till 2 dygn. Provet skickas snarast till laboratoriet.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Påvisat / Ej påvisat
Svarstid	Analysen utförs alla dagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan efterbeställas inom 2 dygn.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övriga upplysningar	Ej tillämpligt
Medicinsk bakgrund/Indikation	Misstanke om diarré orsakad av C. difficile, t.ex. antibiotika-associerad diarré/kolit eller pseudomembranös kolit. Dubbel- och trippelprov samt kontrollprov är ej indicerat.

Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2022-10-09	5	Lagt till rubrik revideringar
2023-10-01	6	Ny fastställare

Kopians giltighet garanteras endast utskriftsdatumet