

Provtagningsanvisning Bikarbonat i plasma (CO₂) - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller pappersremiss 1 Bassortiment Gävleborg
Provtagning	5 mL Li-Heparin, gelrör, mintgrön propp  Ta prov utan stas. Röret måste vara välfyllt, mer än halvfyllt! Proppen får ej tas av eftersom provet är mycket känsligt för luft. EDTA-rör kan ej användas. Prov kan ej tas kapillärt.
Förvaring/Transport	Centrifugera provet snarast. Plasma hållbart 7 dygn i kyl om röret är förslutet. Efter avkorkning sjunker CO ₂ med 4 mmol/L efter en timme.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk kemi och transfusionsmedicin i Gävle, Hudiksvall och Bollnäs
Referensintervall	20–28 mmol/L
Svarstid	Dagligen
Ackreditering	Ja
Efterbeställning	Bikarbonat kan ej efterbeställas.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/Övrig upplysning	Ej tillämpligt

Medicinsk bakgrund/ indikation	Indikation: Utredning av rubbning i syra-bas balansen. Med totalkolsyra menas summan av fysikaliskt löst koldioxid (CO₂), kolsyra (H₂CO₃) och vätekarbonat/bikarbonat (HCO₃⁻). Vid bestämningen kommer såväl respiratoriska (CO₂) som metaboliska komponenter (HCO₃⁻) att påverka resultatet. Då (HCO₃⁻) normalt svarar för ca 95 % av totalkolsyran, återspeglar resultatet framför allt den metaboliska komponenten i syra-bas-balansen. Normalt värde utesluter allvarlig syra-bas-rubbning. Sänkta värden hos en patient utan primärt rubbad lungfunktion talar för metabolisk acidosis, medan höjda värden talar för metabolisk alkalos. Analysen är enbart orienterande och vid abnormt utfall bör i många fall komplett syra-bas-status utföras för bättre bedömning.
-----------------------------------	---

Revideringar

Datum	Revisionsnummer	Ändring
2023-07-10	13	Lagt till rubriken revideringar. Hållbarhet justerat under förvaring.