

Provtagningsanvisning vagina/cervix/uretra, odling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	Remiss: Elektronisk remiss från Soarian, PMO/LabCenter eller LabPortalen (Reservrutin pappersremiss, Remiss 2 Mikrobiologi Laboratoriemedicin Region Gävleborg) Anamnes: Dessa faktorer är viktigt att få med på remissen: - Indikationen för provtagningen - Symtom - Är patienten gravid - Provtagningslokalisering - Patientens allmäntillstånd och underliggande sjukdomar - Eventuell antibiotikabehandling (avslutad, pågående eller planerad med preparatnamn). Finns någon antibiotikaallergi?
Provtagning	Provtagningsmaterial: Provtagningspinne CP480CE regular E-Swab rosa: artikelnr: 201515 Provtagningspinne CP483CE Uretra E-Swab orange: artikelnr: 201514 Provtagningspinne CP482CE nasopharynx E-Swab blå: artikelnr: 201520 Utförande: <u>Cervix:</u> Använd spekulum. För in provtagningspinnen i cervixkanalen och rotera. Berör ej vaginalslemhinnan så att provet kontamineras. Sätt ner pinnen i provtagningsröret och skruva åt korken. <u>Vagina:</u> Roterar pinnen mot slidväggen, 2-3 cm upp. Var noga med att föra isär ingången. Sätt ner pinnen i provtagningsröret och skruva åt korken. Vid GBS-screening rekommenderas att provet tas

Provtagningsanvisning

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning vagina/cervix/uretra, odling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

2(3)

Dokument ID: 09-797375

Giltigt t.o.m.: 2024-12-05

Revisionsnr: 1

	långt ner i vagina där GBS-förekomsten är högst <u>Uretra:</u> Gör ren uretramynningen med kompress. Tag provet genom att föra in pinnen 2-4 cm i uretra, rotera den försiktigt 3-5 sek. Sätt ner pinnen i provtagningsröret och skruva åt korken. På kvinnor tas prov från uretramynningen.
Förvaring/transport	Förvaras kylt i väntan på transport
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Mikrobiologi Gävle sjukhus
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Slutsvar vanligen inom 2-4 vardagar.
Ackrediterad	Ja
Efterbeställning	Kan inte efterbeställas
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Nej
Kommentarer/övrig upplysning	Vid dessa odlingar rapporteras förekomst av luftvägspatogener såsom <i>betahemolytiska streptokocker</i> (A, C, G), <i>Haemophilus influenzae</i> och <i>Streptococcus pneumoniae</i> eller annan patogen som kan sättas i samband med anamnesen. Gravida screenas alltid för förekomst av <i>grupp B streptokocker</i> (GBS). Relevanta fynd art- och resistensbestäms. Vid misstanke om svampinfektion ska alltid separat svampodling beställas. Observera att sexuellt överförda infektioner (<i>C. trachomatis</i>, <i>N.gonorrhoeae</i>, <i>syphilis</i>, <i>Mycoplasma genitalium</i>) och vissa bakterier som <i>Mycoplasma hominis</i> och <i>Ureaplasma urealyticum</i> inte kan detekteras vid vanlig genital odling utan kräver riktad diagnostik.

Provtagningsanvisning

Dokumentnamn: Provtagningsanvisning vagina/cervix/uretra, odling - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg 3(3)

Dokument ID: 09-797375

Giltigt t.o.m.: 2024-12-05

Revisionsnr: 1

Medicinsk bakgrund/indikation	- vaginal flytning, eventuellt med klåda och smärtor i underlivet - screening för grupp B streptokocker (GBS) hos gravid inför förlossning eller vid fosterdöd - misstanke om endometrit - flytning ur uretra, eventuellt med klåda, tyngdkänsla eller smärta i underlivet hos män - misstanke om bakteriell prostatit OBS! Diagnosen bakteriell vaginos är en klinisk diagnos, varför värdet av odling är tveksamt och vi avråder från provtagning för sådana odlingar.
----------------------------------	---

Revideringar

Datum	Revisionsnr	Ändring
2023-10-29	1	Nytt dokument.